



① 라이너 위에 캐스팅을 하는 경우 환부 끝 공기를 완전히 제거해 주며 라이너를 잘 씌워줍니다.



③ 캐스팅 후의 세척과 석고가 잘 빠지게 하기 위한 랩을 씌웁니다.
(라이너 없이 할 경우, 맨살에 랩 씌움.)



② 대퇴부가 잘 맞는 라텍스 풍선을 선택한다. 접힌 라이너와 풍선과의 접촉으로 봉합부를 만든다. 이때 약한 윤활제나 로션이 봉합에 도움을 줍니다. 확인후 라텍스 풍선을 벗깁니다.



④ 얇은 캐스트 스타킹을 씌우고, 무릎을 약간 굽힌 후 파텔라 부위나 특별히 표시가 필요한 곳에 랜드마크를 합니다.



⑤ 무릎을 약간 굽힌 채로 찬물에 흥건히 적신 석고붕대를 감습니다. 그 위에 면스타키넷을 씌우고 환부 끝에 남은 부위는 석션을 돕기 위해 그대로 남겨둡니다.



⑦ 석션을 켜서 기압 400~650 mmHg을 유지해 줍니다. 무릎이 약간 굽혀졌는지 확인합니다. 석션하는 동안 일부러 손으로 일그러뜨려 모양을 만들지 마십시오.



⑥ 환부 끝에 라텍스 풍선의 끝 부분이 완전히 닿도록 씌워준 후, 석션호스를 연결해 줍니다.



⑧ 마를 때 까지 그대로 두시고, 완전히 마른 후에 라텍스 풍선과 캐스트를 제거해 주세요.

하모니® 시스템 악세서리 (Accessories for Harmony® System)



755E20 = 230 하모니® 진공 펌프 세트 (Harmony® Vacuum Pump Set)

구성품 ;

683G1=10 라텍스 풍선 캐스팅 백 세트(Latex Casting Bags set)

755Z19=230 진공펌프 (Vacuum Pump)

625P1=1.0 연결퓨즈, 지연동작 (Fuse Link, delay action)

616R2=10X2 석션 PVC튜브 (PVC Suction Tubing)

755Y16=1/4"X6 노즐 호스 (Threaded Hose Nozzle)

683G1=1 수분 분리기 (Water Separator)

683G1=5 진공튜브 (Suction Tubing)

755Z20=2 필터 (Filter)

662F2 Bag for 755E20=230 오토복 하모니 진공 펌프 세트 가방

라텍스 풍선 캐스팅 백 (Latex Casting Bags)

Article no.	683G1 =
Sizes	Small (7), Medium (8), Large (9) 세가지 사이즈 세트 (10)